

サイドレールクッションカバー(L字用) 取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お客様が安全に、そして快適にご使用いただくために、注意事項・お手入れの仕方・正しいご使用方法を記載しました。ご使用前に、必ず本説明書をお読み下さい。
また、お読みになられた後も大切に保管して下さい。

製品の都合上、予告なく仕様が変更される場合がございます。あらかじめご了承下さい。
取扱説明書や製品に関するご質問は、下記までお問い合わせ下さい。

■ 安全上のご注意

- 本製品は、ベッドサイドレールの隙間からの手足の転落防止や体をぶつけた時などの衝撃緩和を目的としており、全ての事故およびケガを防止することを保証するものではありません。
- 本製品は、ベッドサイドレールに取り付けて使用する製品です。
目的以外のご使用はおやめ下さい。
- 本製品は使用方法が不適切な場合において、生命や身体に重大な影響を及ぼす恐れがございますので、医師や専門家とご相談の上、ご使用下さい。
- 本製品の加工、改造、修理は行わないで下さい。製品の機能低下をまねき、事故の原因となります。
- かゆみ、かぶれ、発疹、肌荒れなど皮膚に異常を感じた際は、すぐに使用を中止し、医療機関に相談し指示に従って下さい。
- 取り付ける際は、ベッドサイドレールに合ったサイズのカバーをお使い下さい。
サイズの合わないものに取り付けた場合、破損や変形するおそれがございます。
※カバー内側のサイズ(内寸)は下記の仕様欄をご参照下さい。
- 汚れた状態で放置すると、匂いや染みの原因となります。
お早目にお手入れをして下さい。
- 本製品が破損したり、破れやほつれのある場合はすぐに使用をお止め下さい。


■ 各部の名称・装着方法

(21.05_01)

- 1 ベッドサイドレールにサイドレールクッションカバー本体を上から被せるように装着します。
- 2 サイドレールからカバー本体がはずれないようにボタンで固定します。

《断面図》

(ベッドの内側)

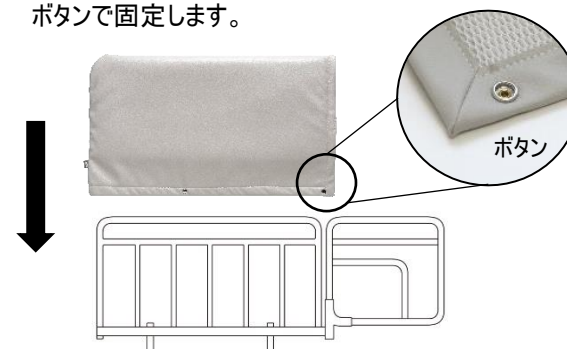

クッションの厚さ: 約2cm

■ : クッション
■ : ベッド柵

※本製品は固定部に取り付けるカバーです。
可動部には取り付けられません。

■ お手入れ方法

- 本体の汚れは、よく薄めた中性洗剤を布等に湿らせて拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- 本製品を洗うことはできません。
- 本製品は耐薬品加工の素材のためアルコール消毒が可能ですが、長期に渡って毎日アルコール消毒を行うと、硬化・劣化の原因となります。
- 基本的な消毒は、濃度1%未満の次亜塩素酸ナトリウム水溶液のご使用をおすすめします。

■ 仕様

《商品名》サイドレールクッションカバー(L字用) 《品番》0102

《サイズ(内寸)》幅75cm × 高さ44cm

《サイズ(外寸)》幅79cm × 高さ46cm

《素材》表地: ポリ塩化ビニール100%(耐薬品性)

中材: [フュージョン] ナイロン74%、ポリエステル26%

[V-Lap] ポリエステル100%

製造元・お問合せ先



株式会社 特殊衣料

TOKUSHUIRYO

〒063-0834 札幌市西区発寒14条14丁目2-40

TEL: 011-663-0761 FAX: 011-663-0955

メール: shop-info@tomoni.co.jp