


株式会社 特殊衣料 トランスポートベルト取扱説明書

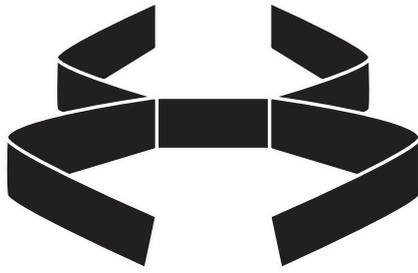

■お使いになる前に

- 取り付ける際は、背面部分と身体側のサイズを確認してからご使用下さい。
- マジックテープ部分は必ずきちんと留めて下さい。留め方が不十分な場合、怪我をする恐れがあります。
- 破れやほつれのある商品をご使用にならないでください。

■お手入れの方法について

- 汚れた際は、水または中性洗剤で拭き、水分が残らないよう十分に乾燥させてください。また、汚れた状態で放置をしないで下さい。
- 本商品を洗うことはできません。
- 本製品は耐薬品加工を施していますが、アルコールを使用すると、硬化が促進されます。アルコール類・フェノール類を含む洗剤はなるべくお避け下さい。
- 洗濯機、脱水機、乾燥機はお使いいただけません。

! 汚れたときは拭き取りで！

本商品は洗うことができません。
汚れたときは水・または中性洗剤で拭き取り、
水分が残らないよう十分に乾燥させてください。

表地 PVC
裏面 綿 100%



■商品製造元

株式会社 特殊衣料 〒063-0834 札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40
tel.011-663-0761 fax.011-663-0955 <http://tomoni.co.jp/>