



車椅子ベルト

- ・車椅子乗車時の座位保持に適しています。
- ・通気性の良いメッシュを使用しておりますので、ムレにくいです。
- ・胸の部分のデザインがポケット状になっておりますので、クールパックやハンカチなどの小物を入れることができ、便利です。
- ・ベルトの長さが自由に調節できますので、幅広いサイズに対応できます。


●装着方法●

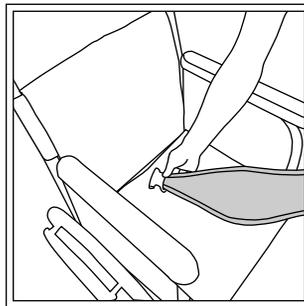


① 股下ベルトを座面と背もたれの隙間に通します。

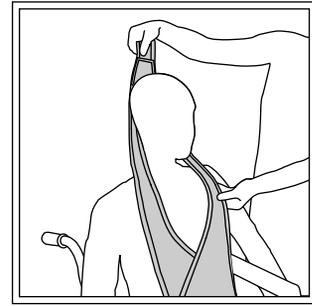


② 車椅子に座り、肩ベルトに頭を通します。

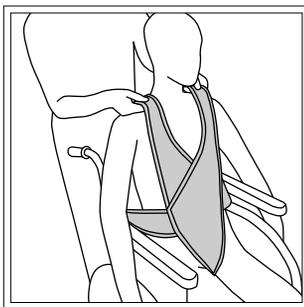

③ 肩と胸の位置を合わせます。

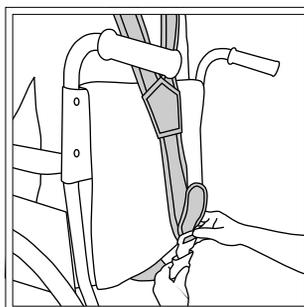

④ 肩ベルトと股下ベルトをつなげ、長さを調節します。

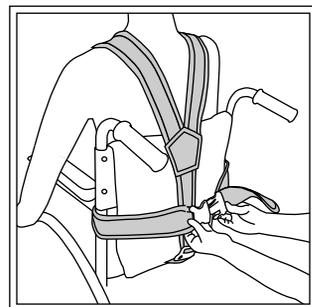

⑤ 最後に、胸ベルトを車椅子の後ろに回し、つなげてから、長さを調節します。

●仕様

色：ブルー・ブラウン・ブラック
素材：ポリエステル100%・他

●洗濯の注意事項

- ・洗濯時は、ベルトのバックルをつないだ状態で洗ってください。破損の原因になります。
- ・洗濯機を使用する場合はネットに入れて洗濯してください。
- ・乾燥機はご使用になれません。
- ・塩素系漂白剤・蛍光増白剤の含まれる洗剤は変色の原因になりますので使用できません。

●取扱注意事項

- ・普通型の車椅子以外には使用しないでください。
- ・リクライニング車椅子には使用しないでください。
- ・車椅子の座位保持以外の目的でのご使用はお止めください。
- ・看護者、介護者の目の届く範囲で使用してください。
- ・座面と背もたれが一体型の車椅子には使用しないでください。