



車椅子キーパー 取扱説明書

■お使いになる前に

- 看護者、介護者の目の届く範囲でご使用下さい。
- 取扱説明書をよくお読みの上お使い下さい。
- 本製品は、車椅子からずり落ちることを防止するための商品(自ら脱着が可能)です。拘束帯としてはご使用にならないで下さい。



禁止

- 普通型の車椅子以外には使用しないで下さい。
特にリクライニング車椅子の場合、リクライニング時に首や腹部など身体を圧迫する可能性があります。
- 本品の加工・改造は行わないで下さい。

■ご使用方法

- 車椅子に座り、股下ベルトを座面の下に通します。
- 腹部ベルトを車いすの背もたれ側に持っていき、股下ベルトの輪になった部分に通します。
- バックルを留め、バックルカバーで覆います。

■お手入れの方法について

- 塩素系漂白剤のご使用はお避け下さい。蛍光増白剤を含む洗剤を使用されますと、色ムラや変色の恐れがございますのでご注意下さい。
- 洗濯時は、手洗い又は洗濯ネットに入れた状態で洗って下さい。
- 縮み、変形、破損の原因となりますので、高温乾燥機のご使用はお避け下さい。(乾燥機80℃まで可)
- 必ずバックルを留めて洗って下さい。

■商品製造元



株式会社 特殊衣料

〒063-0834 札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40

tel.011-663-0761 fax.011-663-0955

<http://tomoni.co.jp/>