



車椅子シートベルト 背固定タイプ 取扱説明書

■お使いになる前に

- 看護者、介護者の目の届く範囲でご使用ください。
- 取扱説明書をよくお読みの上お使いください。



禁止

- 普通型の車椅子以外には使用しないでください。
特にリクライニング車椅子の場合、リクライニング時に首や腹部など身体を圧迫する可能性があります。
- 本品の加工・改造は行わないでください。

■ご使用方法


- ① 背もたれの背面と腹部を一周するようにベルトを回します。
- ② バックルを止め、アジャスターでベルトの長さを調整してください。(画像参照)



アジャスターで調節します。



Aの矢印の方向にベルトを引っ張りたゆませます。

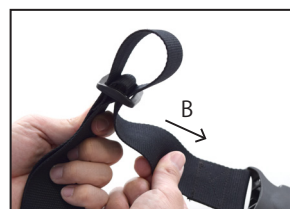

Bの矢印の方向に引っ張るとベルトが長くなります。

■お手入れの方法について



- 洗濯の際はバックルを留め、ネットに入れてください。

■商品製造元



株式会社
特殊衣料

特殊衣料

〒063-0834 札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40

tel.011-663-0761 fax.011-663-0955

<http://tomoni.co.jp/>