

# 車椅子シートベルト カーバックルタイプ 取扱説明書



## ■お使いになる前に

---

- 看護者、介護者の目の届く範囲でご使用ください。
- 取扱説明書をよくお読みの上お使いください。



禁止

- 普通型の車椅子以外には使用しないでください。  
特にリクライニング車椅子の場合、リクライニング時に首や腹部など身体を圧迫する可能性があります。
- 本品の加工・改造は行わないでください。

## ■ご使用方法

---

- 背もたれの背面と腹部を一周するようにベルトを回します。
- バックルを止め、ベルトのサイズを調整してください。
- バックル中央の赤い部分を押しすと、バックルが外れます。

## ■お手入れの方法について

---

- 洗濯機はお使いいただけません。
- ベルトの部分を洗う場合は、手洗いしてください。
- バックル部分を濡らさないようにご注意ください。

## ■商品製造元

---



株式会社

特殊衣料

〒063-0834 札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40

tel.011-663-0761 fax.011-663-0955

<http://tomoni.co.jp/>