



# 株式会社 特殊衣料 車椅子クッション用防水カバー取扱説明書

## ■お使いになる前に

- 取り付ける際は、クッションの大きさに合ったものをお使い下さい。サイズの合わないものに取り付けた場合、クッションやカバーが破損・変形するおそれがございます。
- 汚れた状態で放置すると、臭いや染みの原因となります。お早めにお洗濯をしてください。
- 破れやほつれのある商品はご使用にならないでください。

## ■お手入れの方法について

- お洗濯の際は、ネットに入れて洗って下さい。汚れがひどい場合は部分的な手洗いをおすすめします。
- 乾燥機はお使いいただけますが、60℃までの温度でお使い下さい。高温での乾燥は、商品の磨耗や破損につながります。
- 当商品は防水素材を使用している為、脱水をかけると洗濯機の故障の原因となることがございますので、脱水はごく短時間で行うことをお勧めします。\*

※防水性の素材は水を通さない為、生地や洗濯機に負担がかかる場合がございます。洗濯機をお使いになる際は、洗濯機の説明書も合わせてご確認ください。



**脱水はごく短時間で！**

洗濯機の故障の原因になる場合がございます

## ■商品製造元

株式会社 特殊衣料 〒063-0834 札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40  
tel.011-663-0761 fax.011-663-0955 <http://tomoni.co.jp/>