

この説明書では、  
以下の商品について説明しています。



no.0671/no.0672

まもり帯 ネル2m/3m  
(2本入)

肌触りのよいネルを使用  
した使いやすいタイプ  
です。



no.0673

まもり帯 皮革  
(1本入)

製品内側にフェルトを  
使用しています。装着  
方法も簡単。



no.0674

まもり帯 帆布  
(2本入)

耐久性にすぐれた帆布  
を使用。シンプルで  
使いやすい製品です。




no.0675

まもり帯 ムートン  
(1本入)

天然のムートン素材で  
手首を優しく包み込み  
ます。

## お問合せ先

取扱説明書や製品に関するご質問は下記まで  
お問合せ下さい。

 株式会社 特殊衣料

TEL : 011-663-0761

FAX : 011-663-0955

E-Mail : [otoiawase@tomoni.co.jp](mailto:otoiawase@tomoni.co.jp)

URL : <http://www.tomoni.co.jp/>

〒063-0834 札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40

## 商品に関する禁止事項と注意



ひもやベルトをきつく  
締めすぎないようにご注  
意下さい。



口に入れる、振りまわす、  
肌をこする、圧力をかけ  
るといった行為が見ら  
れる場合は直ちに使用  
を中止して下さい。



長時間の使用は血流が  
滞る原因になります。  
おやめ下さい。



磨耗・損傷が見られる場  
合は使用を中止して下さ  
い。



商品の加工・改造はお  
やめ下さい。



医療従事者や現場監督  
者の指示に従い、正し  
くお使い下さい。

## 介護保険制度における 拘束や抑制の禁止について

介護老人保険施設（指定介護老人福祉施設）  
での身体拘束禁止規定より抜粋

介護老人保健施設（指定介護老人福祉施設）は、  
サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他  
の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急や  
むを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者  
の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」と  
いう。）を行ってはならない。

《 緊急やむを得ない場合の対応 》

介護保険指定基準上、「当該入所者又は他の入所  
者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得  
ない場合」には、身体拘束が認められているが、  
これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの  
要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手  
続きが極めて慎重に実施されているケースに限ら  
れる。

### ①切迫性

入所者本人または他の入所者等の生命または身体  
が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

### ②非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する  
介護方法がないこと（まずは身体拘束を行わずに  
介護するすべての方法を検討し、他に代替手法が  
存在しないことを複数のスタッフで確認する必要  
がある）

### ③一時性

身体拘束その他の行動制限が一時的なものである  
こと（本人の状態に応じて必要とされる最も短い  
拘束時間を想定する必要がある）


# まもり帯

取扱説明書

この度はまもり帯製品をお買い上げい  
ただき、誠にありがとうございます。  
こちらの取扱説明書には、注意事項や  
お手入れの方法などを記載しています。  
ご使用前に説明書を必ずお読み下さ  
い。また、お読みになられたあとも大  
切に保管してください。

## まもり帯ネルの装着順

### 各部の名称

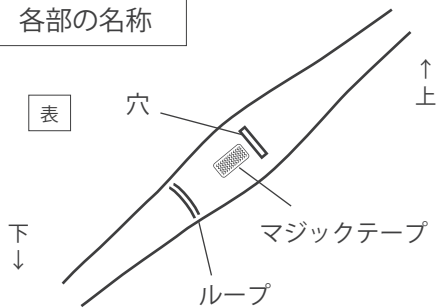


1

裏面から、下の帯の先端を穴に通す。




2

輪に腕を通し、緩みすぎたりきつすぎたりしないよう、サイズを調整し、マジックテープで止める。

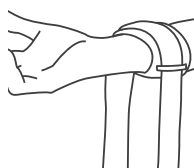

3

穴から出した帯をループに通す。

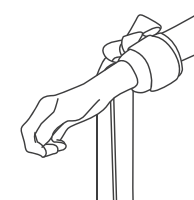

4


帯を結び、ほどけないようにする。

洗い	漂白剤	乾燥機	ドライ
40	×	×	×

■素材：  
ネル/綿 100%  
中材/ウレタン


## まもり帯皮革の装着順

### 各部の名称

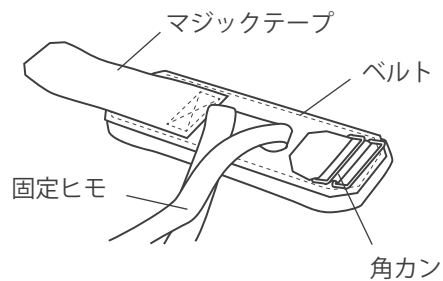

1

ベルト内側に腕を通す。手首のサイズに合わせて角カンにマジックテープを通し、留める。

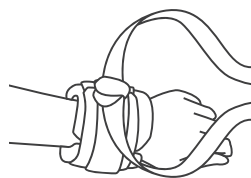

2

固定ヒモを一周させて結ぶ。

洗い	漂白剤	乾燥機	ドライ
×	×	×	×

■素材：  
牛皮  
カツラギ/綿 100%  
ポリエステルフェルト


## まもり帯帆布の装着順

引っ張る方向に強い結び方です。他にも様々な結び方をご利用できますが、お使いの際にはしめすぎないようにご注意ください。




1

帯の中間くらいの位置に図のような輪を作る。

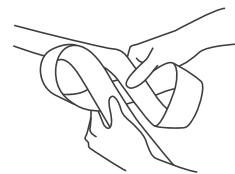


2

図のように、上下が逆になるように、もうひとつ輪を作る。

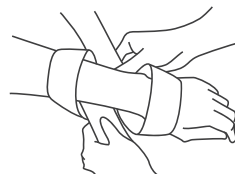

3

ふたつの輪の中に腕を通す。

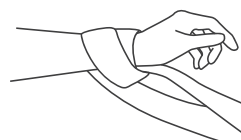

4

帯の端を引いて、締め加減を調節する。

洗い	漂白剤	乾燥機	ドライ
40	×	×	×



■素材：  
帆布/綿 65%、  
レーヨン 35%

## まもり帯ムートンの装着手順

### タグの位置


タグのアルファベットに従って装着します。

### 外面

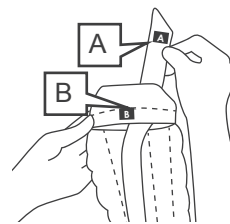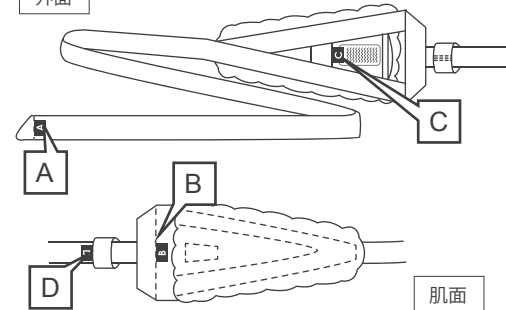


1

Aの先端を肌面からBの穴に通す。

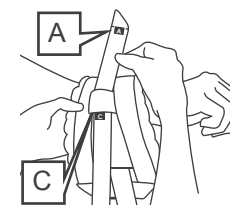

2

ムートンの内側に腕を通し、Aの先端をCのループに通す。

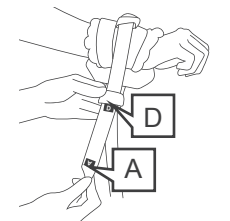

3

Aの先端をDのループに通し、長さを調節してマジックテープを留める。

洗い	漂白剤	乾燥機	ドライ
40	×	×	×

■素材：  
シープスキン  
ポリエステル 100%  
アクリル 100%