

# たすけ帯P型（リハビリ用） 取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お客様が安全に、そして快適にご使用いただくために、注意事項・お手入れの仕方・正しいご使用方法を記載しました。ご使用前に、必ず本説明書をお読みください。  
また、お読みになられた後も大切に保管してください。


製品の都合上、予告なく仕様が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。  
取扱説明書や製品に関するご質問は、下記までお問い合わせください。

## ■ 安全上のご注意

- 本製品は歩行時等に安全に介助するためのものです。被介護者の身体状況を把握された方が、医師・専門家とご相談の上、ご使用ください。
- 装着方法が不適切な場合において、生命・身体に重大な影響を及ぼすおそれがございますので、装着方法を参考にしてください。
- 本製品は、看護者・介護者の目の届く範囲でご使用ください。
- 本製品の加工、改造、修理は行わないでください。製品の機能低下をまねき、事故の原因となります。
- かゆみ、かぶれ、発疹、肌荒れなど皮膚に異常を感じた際は、すぐに使用を中止し、医療機関に相談し指示に従ってください。
- サイズの合わない場合、無理な着用は控えてください。破損や変形するおそれがございます。
- 汚れた状態で放置すると、匂いや染みの原因となります。お早目にお手入れをしてください。
- 本製品が破損したり、破れやほつれのある場合はすぐに使用をお止めください。

## ■ 各部の名称・装着方法

(2023.01\_初版)

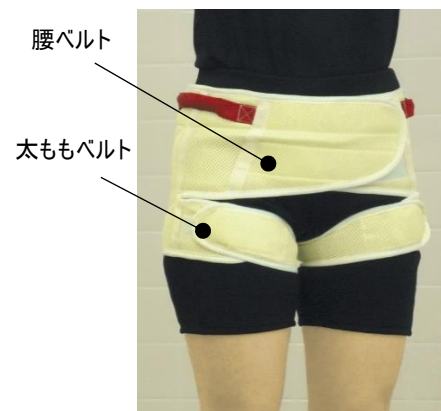

- 1 椅子に本製品を置き、その上に座ります。
- 2 腰ベルトを留めます。
- 3 太ももベルトを留めます。



※上の写真は入浴用です。

## ■ お手入れ方法


- 洗濯時は必ず腰・太もも部のマジックテープを留めてください。
- 洗濯機を使用する場合はネットに入れて洗濯してください。
- 塩素系漂白剤・蛍光増白剤の含まれる洗剤は、変色の原因になりますので使用しないでください。



## ■ 仕様

《商品名》たすけ帯P型(リハビリ用) 《品番》0974  
《適応サイズ》M:腰回り70-85cm L:腰回り85-100cm  
《耐荷重》100kgまで  
《素材》本体:ポリエステル100%(裏面のみすべり止め付き)  
持ち手:ナイロン100%  
中材:ナイロン74%、ポリエステル26%

## 製造元・お問合せ先

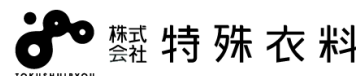

〒063-0834 札幌市西区発寒14条14丁目2-40  
TEL:011-663-0761 FAX:011-663-0955  
<http://www.tomonico.jp/>