


no.4011 座面付キーパー（セルフ脱着タイプ）


取扱説明書



【装着方法】

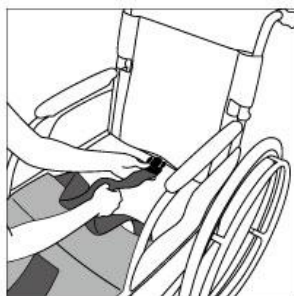

①座面固定ベルトを車椅子の背シートと座面の隙間に通します。

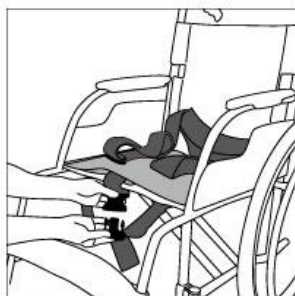

②座面固定ベルトを車椅子の座面の下を通し、バックルで固定します。



③車椅子に座り、車椅子ごと巻き込むように胴体固定ベルトを回します。



④バックルを固定しカバーで覆います。

注意・禁止事項

- 本製品は、車椅子乗車時の姿勢を保つための製品です。使用目的以外のご使用はしないでください。
- 普通型車椅子以外（リクライニング車椅子等）には使用しないでください。
- ご使用前に破損や異常が発生していないか必ず点検してください。破損や異常が見られた場合はそのまま使用せず、お近くの販売店または弊社までご連絡ください。
- 装着部にかぶれや痛みが生じた場合、直ちに使用を止め、医師に相談し適切な処置を受けてください。
- 本製品を無断で加工・改造・修理等を行わないでください。製品の機能低下を招き、事故の原因となります。

お手入れ方法

- ①中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸けて、手洗い（押し洗い）してください。
- ②水又はぬるま湯で十分にすすぎ、形を整えて陰干ししてください。



あて布使用

お手入れ時の注意事項

商品の破損、傷み、色移りなどが発生する場合がありますので、以下の行為はお控えください。

- 乾燥機の使用
- 濡れたまま放置する
- 強くこする・もみ洗い
- 他の衣類と一緒に洗う
- 漂白剤・有機溶剤の使用

品番	4011
TAISコード	01365-000009（貸与）
サイズ	座面：40×40cm 座面固定ベルト：〔オス側〕27cm-60cm〔メス側〕13cm
適応サイズ	ウエスト：70-110cm
素材	表地：コーデュラナイロン100%（防水加工） 座面表地：ナイロン100%（防水加工） バックル：ポリアセタール
重量	約450g



株式
会社

特殊衣料

〒063-0834 北海道札幌市西区発寒14条14丁目2-40

TEL:011-663-0761 FAX:011-663-0955 <https://www.tomoni.co.jp>