

この説明書では、  
以下の商品について説明しています。



no.0671

まもり帯 ネル 2m  
(2本1組)

肌触りのよいネルを使用した使いやすいタイプです。



no.0673

まもり帯 皮革  
(1本入り)

製品内側にフェルトを使用しています。装着方法も簡単。



no.0674

まもり帯 帆布  
(2本1組)

耐久性にすぐれた帆布を使用。シンプルで使いやすい製品です。



no.0675

まもり帯 ムートン  
(1本入り)

天然のムートン素材で手首を優しく包み込みます。

## お問合せ先

取扱説明書や製品に関するご質問は下記までお問合せください。

 株式会社 特殊衣料

TEL : 011-663-0761

FAX : 011-663-0955

URL : <https://www.tomoni.co.jp>

〒063-0834 札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40

## 商品に関する禁止事項と注意



ひもやベルトをきつく締めすぎないようにご注意ください。



口に入れる、振りまわす、肌をこする、圧力をかけるといった行為が見られる場合は直ちに使用を中止してください。



長時間の使用は血流が滞る原因になります。おやめください。



磨耗・損傷が見られる場合は使用を中止してください。



商品の加工・改造はおやめください。



医療従事者や現場監督者の指示に従い、正しくお使いください。

## 介護保険制度における 拘束や抑制の禁止について

介護老人保険施設（指定介護老人福祉施設）  
での身体拘束禁止規定より抜粋

介護老人保健施設（指定介護老人福祉施設）は、サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

《 緊急やむを得ない場合の対応 》

介護保険指定基準上、「当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」には、身体拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られる。

### ①切迫性

入所者本人または他の入所者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

### ②非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと（まずは身体拘束を行わずに介護するすべての方法を検討し、他に代替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要がある）

### ③一時性


身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること（本人の状態に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要がある）

## まもり帯 取扱説明書

この度はまもり帯製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書には、注意事項やお手入れの方法などを記載しています。ご使用前に説明書を必ずお読みください。また、お読みになられたあとも大切に保管してください。

## まもり帯ネルの装着順

### 各部の名称

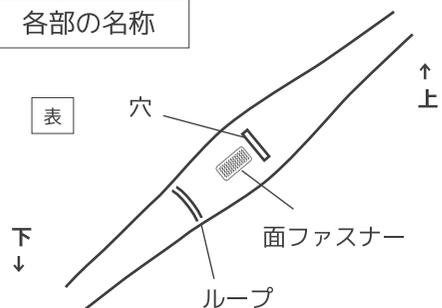


1

裏面から、下の帯の先端を穴に通す。




2

輪に腕を通し、緩みすぎたりきつすぎたりしないよう、サイズを調整し、面ファスナーで止める。

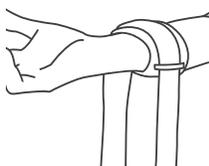

3

穴から出した帯をループに通す。

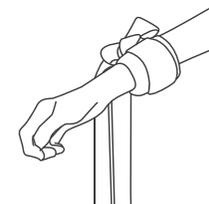

4


帯を結び、ほどけないようにする。

洗い	漂白剤	乾燥機	ドライ
40	×	×	×

■素材：  
表地 / 綿 100%  
中地 / ウレタン  
面ファスナー /  
ナイロン 100%


## まもり帯皮革の装着順

### 各部の名称

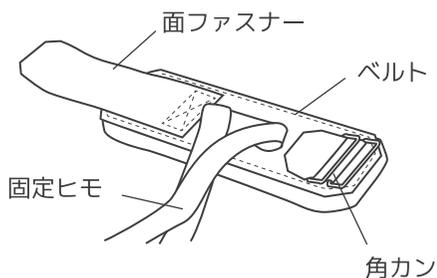

1

ベルト内側に腕を通す。手首のサイズに合わせて角カンに面ファスナーを通し、留める。

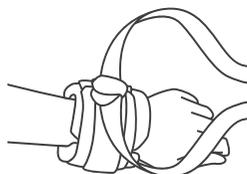

2

固定ヒモを一周させて結ぶ。

洗い	漂白剤	乾燥機	ドライ
×	×	×	×

■素材：  
皮革部 / 牛革 + 綿 100%、  
ポリエステルフェルト  
面ファスナー /  
ポリエステル 100%  
ひも / 綿 100%

## まもり帯帆布の装着順

引っ張る方向に強い結び方です。他にも様々な結び方をご利用できますが、お使いの際にはしめすぎないようにご注意ください。




1

帯の中間くらいの位置に図のような輪を作る。




2

図のように、上下が逆になるように、もうひとつ輪を作る。

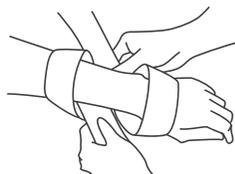

3

ふたつの輪の中に腕を通す。

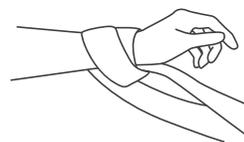

4

帯の端を引いて、締め加減を調節する。



洗い	漂白剤	乾燥機	ドライ
40	×	×	×

■素材：  
綿 65%  
レーヨン 35%

## まもり帯ムートンの装着手順


### タグの位置

タグのアルファベットに従って装着します。

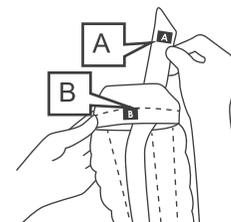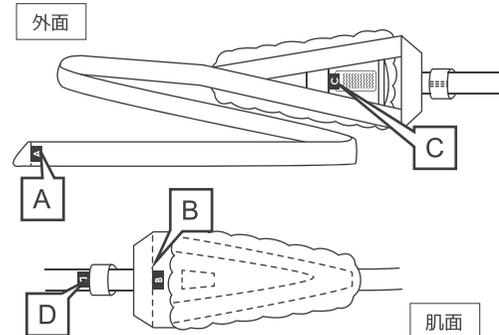


1

Aの先端を肌面からBの穴に通す。

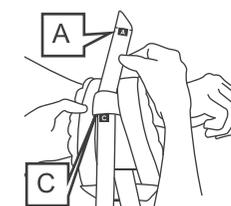

2

ムートンの内側に腕を通し、Aの先端をCのループに通す。

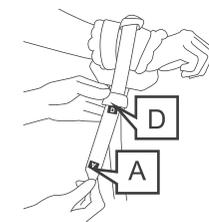

3

Aの先端をDのループに通し、長さを調節して面ファスナーを留める。

洗い	漂白剤	乾燥機	ドライ
40	×	×	×

■素材：  
手首ベルト /  
シープスキン  
ひも / アクリル 100%  
別布 /  
ポリエステル 100%