

介護保険制度における拘束や抑制の禁止について

介護老人保健施設（指定介護老人福祉施設）での身体拘束禁止規定より抜粋

介護老人保健施設（指定介護老人福祉施設）は、サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

＜ 緊急やむを得ない場合の対応 ＞

介護保険指定基準上、「当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」には、身体拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の 3 つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られる。

①切迫性

入所者本人または他の入所者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

②非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと（まずは身体拘束を行わずに介護するすべての方法を検討し、他に代替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要がある）

③一時性

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること（本人の状態に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要がある）

商品に関する禁止事項と注意事項



口に入れる、振りまわす、肌をこする、圧力をかけるといった行為が見られる場合は直ちに使用を中止してください。



ひもやベルトをきつく締めすぎないようにご注意ください。



商品の加工・改造はおやめください。



磨耗・損傷が見られる場合は使用を中止してください。



長時間の使用はおやめください。血流が滞る原因になります。



医療従事者や現場監督者の指示に従い、正しくお使いください。

「まもっ手 TOKUSHUIRYOU」シリーズ取扱説明書

まもっ手 TOKUSHUIRYOU




この度は「まもっ手 TOKUSHUIRYOU」製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書には、注意事項やお手入れの方法などを記載しています。ご使用前に説明書を必ずお読みください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

この説明書では以下の商品について説明しています。


no.0651/0681 チェックタック無し
no.0657/0687 ソフト
no.0653/0683 サラサラ
no.0655/0685 無地 タック付
no.0656/0686 チェック タック付

no.0652/0693 チェック プッシュボタン
no.0667/0696 ソフト プッシュボタン
no.0661/0694 無地 指先オープン（ノーマル）
no.0662/0695 無地 指先オープン（ストロービーズ）

ひも留めタイプの使い方

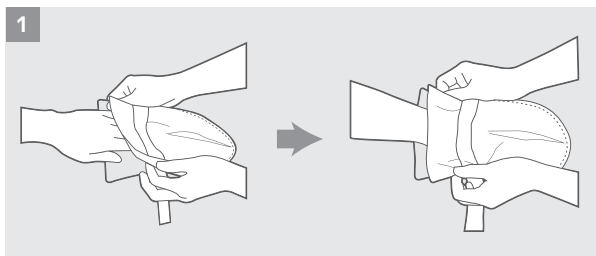


まもっ手に手を入れる。
固定ひもが縫い付けてある面
を手の甲側となるようにする。

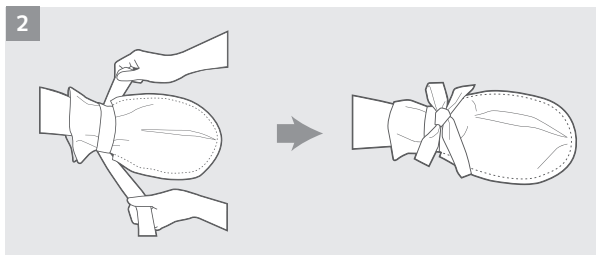


手から抜け落ちないように、
固定ひもを手首の位置で結び、
装着する。

※きつく結びすぎると血流が
滞る恐れがありますのでご注意
ください。

プッシュボタンタイプの使い方

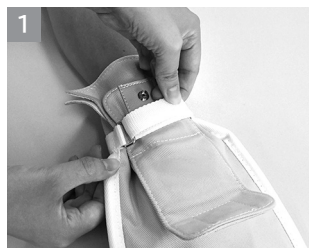

手首ベルトを角カンにひっかけて
留める。

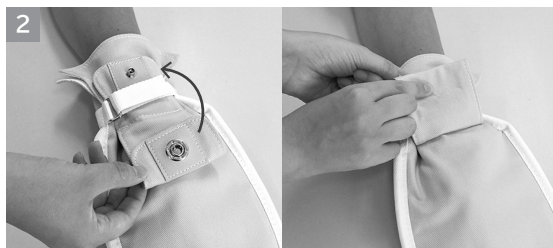

手首ベルトをくるんでプッシュボタンを留める。

■プッシュボタンの外し方



製品を外す際はベルトカバーの中に
指を入れ、プッシュボタンの中央部
を「パチッ」と音がするまで強く押
してください。


※爪を立てるように押すと外れやす
くなります。

※中央部は布の内側にあるため、表
からは見えません。

各部の名称

ひも留めタイプ


タック（タック付のみ）

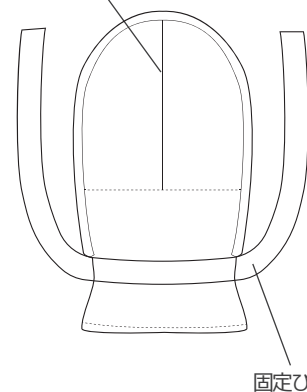

固定ひも

プッシュボタンタイプ

ベルトカバー

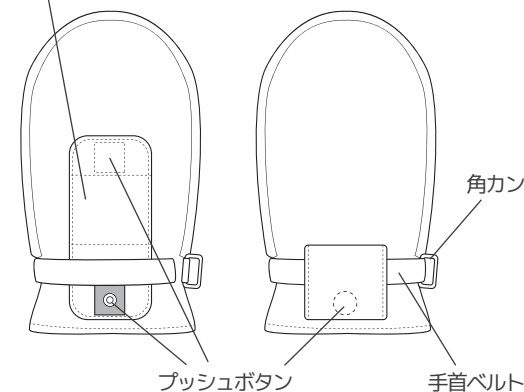

プッシュボタン

手首ベルト

角カン

お手入れ方法と注意



①40℃以下の水温の洗濯機で、ネットに入れて洗ってください。

②水又はぬるま湯で十分にすすぎ、形を整えて陰干ししてください。

※プッシュボタンタイプは必ず手首ベルトとボタンを留めた状態で洗ってください。

商品の破損、傷みなどが発生する場合がありますので、以下の行為はお控えください。

- 乾燥機の使用
- 濡れたまま放置する
- 強くこする・もみ洗い
- 漂白剤・蛍光増白剤の使用
- ドライクリーニング

取扱説明書や製品に関するご質問はこちらへお問い合わせください。



株式
会社

特殊衣料

〒063-0834 北海道札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40

TEL : 011-663-0761 FAX : 011-663-0955

<https://www.tomoni.co.jp>