

たすけ帯O型

入浴介助用ベルト



介護する方《ヘルパーさんやご家族》の
介護負担の軽減とリスク回避のために



サイズ


Mサイズ

ウエスト 60～85cm

Lサイズ

ウエスト 85～110cm

ウエストとは？

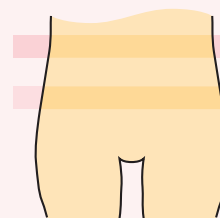

◀ ウエスト

◀ 腰まわり

ウエストの測定は、一番細い部分で計るようにしてください。

ゆらくらく介助

浴槽内でふらつく方の姿勢保持のための介助ベルトです。素肌でつかむところがない入浴介助時等で使用します。とっさの時につかみやすいよう、ゆとりのある持ち手が横4本と縦2本ついています。

たすけ帯O型の特徴

肌に直接あたる裏地には、吸水性・速乾性に優れた「コントロールパイル(旭化成)」素材を使用している。

【コントロールパイルの特徴】

肌面でキャッチした水分を外面にすばやく拡散するため、肌面はサラサラな状態を保てる、という特徴を持つ素材。

※O型は基本的には、ふらつきがある方の姿勢保持の時のための商品です。上方向に持ち上げるとずり上がってくるので、持ち上げる動作が必要な方にはV型かP型をおすすめします。

止め方	マジックテープとバックル (ウエスト部分1箇所)
素材	表地: ポリエステル 76% ナイロン 24% 裏地: ポリエステル 100%
色	本体: イエロー 持ち手: レッド
持ち手	チューブ入り 横: 4本 縦: 2本
持ち手のゆとり	ゆとり有り ふらつきの時などに、とっさにつかみやすいように、持ち手にゆとりを持たせている。

TAISコード M: 01365-000005 L: 01365-000006



株式会社
特殊衣料

特殊衣料

〒063-0834 北海道札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40

tel.011-663-0761 fax.011-663-0955 <https://tomoni.co.jp>

装着手順

【注意事項】

- 装着時は、必ず安全を確保するようお願いします。
- 立位での装着も可能です。
- 状態像を見極めて使用して下さい。

たすけ帯O型 入浴介助用ベルト

～座位の状態、装着する場合～

ホームページで装着手順の動画をご覧いただけます。▶ <http://www.tomoni.co.jp>

1 たすけ帯を前に持ってくる



ウエスト部に【たすけ帯O型】をあて、前に持ってきます。

2 オレンジのタグを合わせる



この時、オレンジのタグを背中
の中心(背骨)に合わせます。

3 マジックテープでとめる



腰ベルトを前に持ってきて、マジックテープをしっ
かりととめます。その後にバックルをカチツという音
がするまでとめ、バックルの赤いベルトを調節します。
ゆとりをもたせないように装着して下さい。

装着完了 腰(ウエスト)部に 巻きつけるベルト型



前 側



後 側

たすけ帯シリーズ ～安心そして安全に入浴介助ができるように考慮し、3タイプご用意しました～

タイプ	装着の しやすさ	主な介助場面	使用対象となる方
V型 【帯型】	○	イスや浴槽での 立ち座り	・全介助、半介助が必要な方 ・体型によって、一人の介助が大変な方
P型 【パンツ型】	○	イスや浴槽での 立ち座り	・全介助、半介助が必要な方 ・体型によって、一人の介助が大変な方
O型 【ベルト型】	◎	座位での横移動、 立位、歩行介助	・半介助が必要な方 ・立位保持が不安定な方

V型



P型



取扱注意事項

- 当製品は入浴時等に安全に介助するためのものですので、被介護者の身体状況を把握された方が、医師・専門家とご相談の上、ご使用下さい。
- 装着方法が不適切な場合において、生命・身体に重大な影響を及ぼす恐れがございますので、装着方法を参考にして下さい。
- 本製品に手を加え、加工することは事故の原因となりますので、おやめ下さい。

洗濯方法

- 洗濯時はマジックテープを止めて洗って下さい。
- 洗濯機を使用する場合はネットに入れて洗濯して下さい。
- 乾燥機はご使用になれません。
- 塩素系漂白剤・蛍光増白剤の含まれる洗剤は、変色の原因になりますので、ご使用になれません。
- 水に濡れたまま放置しますと、持ち手の部分の色が移る場合がございますので、ご注意下さい。