

たすけ帯P型

入浴介助用ベルト

介護保険
給付対象
商品

介護する方《ヘルパーさんやご家族》の
介護負担の軽減とリスク回避のために



★ワンポイントアドバイス

装着後に前部をタオル等でおおうと良いでしょう。

サイズ

Mサイズ

腰まわり 70~85cm

Lサイズ

腰まわり 85~100cm

腰まわりとは？



ゆらくらく介助

たすけ帯P型はお尻を包み込んで両太ももにベルトをとめる仕様となっています。そのため、体重が分散され、介助者も被介護者も身体の負担が軽減され、楽に介助することができます。

たすけ帯P型の特徴

- 1 P型は足を上げられない座位の状態、ベッドで寝ている状態でも、装着ができる。
- 2 マジックテープなので、装着が簡単。
- 3 ポリエステルのメッシュ生地を使用しているため、洗濯後の乾燥が早い。
- 4 持ち手はつかみやすいチューブ入りで、様々な場面に対応できるよう、4箇所についている。
- 5 裏地の肌にあたる面には抗菌素材(綿100%)を使用。

止め方	マジックテープ(腰、両太ももの3箇所)
素材	表地:ポリエステル 76% ナイロン 24% 裏地:綿 100%
色	本体:イエロー 持ち手:レッド
持ち手	チューブ入り 4ヶ所
持ち手のゆとり	ゆとり少なめ 持ち手が体により近い方が、持ち上げる時に 負荷が少ないため、持ち手のゆとりを少なく している。

TAISコード M:01365-000003 L:01365-000004



株式
会社

特殊衣料

〒063-0834 北海道札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40
tel.011-663-0761 fax.011-663-0955 <https://tomoni.co.jp>

装着手順

【注意事項】

- 装着時は、必ず安全を確保するようお願いします。
- 状態像によっては、ベッドやシャワーチェアでの装着となります。

たすけ帯 P型 入浴介助用ベルト

～座位の状態、装着する場合～

ホームページで装着手順の動画をご覧いただけます。▶ <http://www.tomoni.co.jp>

1 椅子にたすけ帯を置く



椅子にたすけ帯P型を写真のように開いて置きます。

2 たすけ帯の上に座る



たすけ帯の上へ被介護者に座ってもらいます。

3 腰ベルトをとめる



腰ベルトを前に持ってきて、マジックテープをとめます。

4 太ももベルトをとめる1



太ももベルトのマジックテープをしっかりととめます。
被介護者の体重を介助者に預けるような形で、被介護者の上半身を片側に傾けながら行くと、よりベルトがとめやすくなります。

5 太ももベルトをとめる2



もう片方の太ももベルトのマジックテープもしっかりととめます。


※ベルトがしっかりととまっているか、お確かめ下さい。

装着完了

お尻を包み込んで両太ももにベルトをとめる仕様となっています。



前側

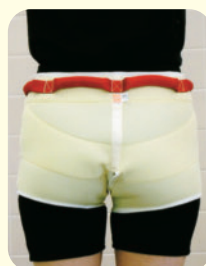

後側

たすけ帯シリーズ ～安心そして安全に入浴介助ができるように考慮し、3タイプご用意しました～

タイプ	装着のしやすさ	主な介助場面	使用対象となる方
V型 【帯型】	○	イスや浴槽での立ち座り	・全介助、半介助が必要な方 ・体型によって、一人の介助が大変な方
P型 【パンツ型】	○	イスや浴槽での立ち座り	・全介助、半介助が必要な方 ・体型によって、一人の介助が大変な方
O型 【ベルト型】	◎	座位での横移動、立位、歩行介助	・半介助が必要な方 ・立位保持が不安定な方

V型



O型



取扱注意事項

- 当製品は入浴時等に安全に介助するためのものですので、被介護者の身体状況を把握された方が、医師・専門家とご相談の上、ご使用下さい。
- 装着方法が不適切な場合において、生命・身体に重大な影響を及ぼす恐れがございますので、装着方法を参考にして下さい。
- 本製品に手を加え、加工することは事故の原因となりますので、おやめ下さい。

洗濯方法

- 洗濯時は腰・太もも部のマジックテープを止めて洗って下さい。
- 洗濯機を使用する場合はネットに入れて洗濯して下さい。
- 乾燥機はご使用になれません。
- 塩素系漂白剤・蛍光増白剤の含まれる洗剤は、変色の原因になりますので、ご使用になれません。
- 水に濡れたまま放置しますと、持ち手の部分の色が移る場合がございますので、ご注意下さい。